

AmpuSafe[®] 102B-19

样本采集器（样本稀释液）

使用说明

【产品名称】

中文名称：AmpuSafe[®] 102B-19 样本采集器（样本稀释液）

英文名称：AmpuSafe[®] 102B-19 Sample Collection and Treatment Device (Sample Diluent)

【液体类型】

样本稀释液

【产品编号】

EM09-01-23

【规格】

100 人份/包

【产品简介】

适用于试剂盒的配套部件，用于样本的采集、处理和检测。

本采集器集样本采样、处理和检测为一体，结构简单，使用方便，实用性强，减少交叉污染。

【产品结构】（详见图 1 和图 2）

液体储存管

连接器

采样拭子

样本处理管

滴头盖

图 1：采集器整体


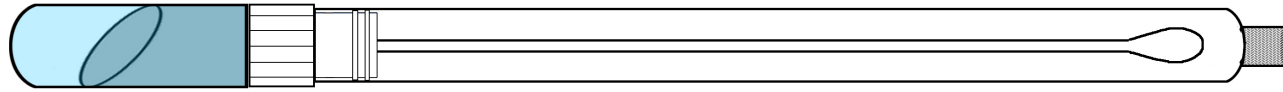


图 2：采集器分解图

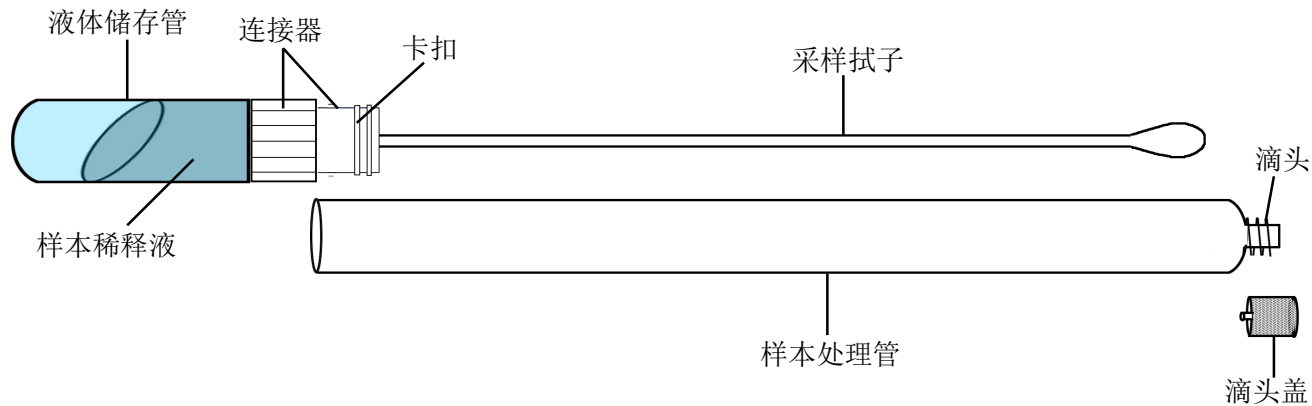

【操作步骤】（参考图 2 和图 3）

1. 将采集器恢复至室温后，用手握住连接器，将样本处理管从连接器的卡扣处（参照示意图 2 内的卡扣处）拔下，取出采样拭子（如图 3 之步骤 1）；
（注意：拔样本处理管时切勿捏住液体储存管，切勿试图边旋转液体储存管边拔，以免过早释放液体！）
2. 用拭子采样（如图 3 之步骤 2），采样后将拭子尽快插回样本处理管内部，使样本处理管与连接器在卡扣处卡紧；
3. 将采集器竖直，使液体储存管一端向上，一只手握住连接器，另一只手逆时针旋转液体储存管直至遇到阻力（如图 3 之步骤 3）；
4. 挤捏液体储存管（如图 3 之步骤 4）使其中的样本稀释液通过连接器流入样本处理管的底部将拭子采样端浸湿（预装的足量样本稀释液可使拭子采样端完全湿润）；
5. 隔着样本处理管的管壁挤捏采样拭子的棉头（如图 3 之步骤 5），使样本充分释放至稀释液中；
6. 将采集器水平放置，旋下样本处理管的滴头盖（如图 3 之步骤 6）；
7. 将采集器竖直（如图 3 之步骤 7），挤捏样本处理管的管壁使液体通过样本处理管的滴头中滴出，做进一步测试。
8. 测试结束，将滴头盖旋回采集器上（如图 3 之步骤 8），防止样本污染环境。

【适用范围】

微生物样本处理和检测。
仅限体外使用。

【注意事项】

1. 使用前请仔细阅读使用说明。
2. 请在有效期内使用，使用前若发现产品标签破损、拭子暴露或样本处理管和液体储存管已破裂等现象，请不要使用。
3. 使用前请将采集器恢复至室温后使用。
4. 打开采集器后，请立即使用。
5. 请视所有样品为具有潜在传染性物质并采取相应防护措施。
6. 本样本采集器为一次性用品，请不要重复使用以免交叉污染。

【贮存条件】

本样本采集器经过辐照灭菌处理，2-25℃保存。

【生产日期】

见产品标签

【有效期】

见产品标签

图 3. 操作流程图 (具体说明详见操作步骤)

